



ORYGEN INSPIRATORY VALVE

Verbeter de ademhalingspiieren.



Leaders in the field of respiratory & critical care products

FORUMED

Respiratory products for Spirometry

ptmedical.nl



Technische Specificaties

De Orygen Inspiratory Valve is bedoeld voor longpatiënten en alle andere personen die hun ademhalingspiers willen verbeteren.

Het product is ontworpen in nauwe samenwerking met artsen van de afdeling Longziekten van het Hospital del Mar in Barcelona (Spanje).

Met de Orygen Valve kunnen de inspiratoire spieren worden getraind. De weerstand kan worden ingesteld van 0 tot 70 cm H₂O met niveau-aanpassingen van 10 cm H₂O. De Orygen Dual Valve is een draagbaar en gemakkelijk te gebruiken product.

Het is een essentieel trainingshulpmiddel voor patiënten, die lijden aan of herstellen van: COPD, astma, beroerte, Parkinson, COVID-19 of dysfagie.

Aanbevolen gebruik:

- **Frequentie:** 4 of 5 dagen per week, tweemaal daags
 - **Wanneer te gebruiken:** Ochtend en nacht
 - **Behandelmethode:**
 - Start training: 3 series van 10 herhalingen 's ochtends en 's avonds
 - Zodra comfortabel; verhogen naar 3 series van 20 herhalingen 's ochtends en 's avonds
 - Gevorderd gebruik: 3 series van 10 ademhalingen 's ochtends en 's avonds
- Het gebruik van de Orygen Inspiratory Valve wordt dagelijks aanbevolen. Merkbare resultaten kunnen worden behaald bij een gebruik van 4 dagen per week.



Bestelinformatie

| Orygen Inspiratory Valve | | | |
|--------------------------|--------------|---|------------|
| Referentienummer | Bestelnummer | Omschrijving | Verpakking |
| F-07 DDVI | 1001124 | Orygen Inspiratory Valve inclusief mondstuk en neusklem | Per stuk |

Ons customer service team is bereikbaar per telefoon of per e-mail voor vragen over verkoop en/of technische vragen.

 Voor Benelux:
Importeur & distributeur
PT Medical BV
Kapteynlaan 13
9351 VG Leek
Nederland
T +31(0) 594 587 280
F +31(0) 594 587 288
mail@ptmedical.nl
www.ptmedical.nl



FORUMED

Respiratory products for Spirometry